



Pusch®

There is no substitute for quality

TOP Grip



El TOP Grip es un producto de nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva.

El diseño inteligente convierte la nueva serie TOP Grip en un instrumental imprescindible para la abrasión selectiva de las uñas: enfermas, engrosadas y deformadas innaturales.

Los instrumentos TOP Grip permiten acortar de forma segura los bordes de las uñas o reducir con seguridad las placas de las uñas hasta el canal.

828T El modelo de utilidad industrial 202012009800.4

841T

805T El modelo de utilidad industrial 202012009800.4

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!



Con nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva ofrecemos al podólogo instrumentos con construcciones especialmente relevantes para la seguridad en el consultorio.

Especialmente en el cuidado de los diabéticos es un objetivo primordial realizar todo tratamiento sin causar lesiones. Nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva ayuda al usuario en estas tareas.

Con las formas individuales de TOP Grip se pueden acortar con seguridad los bordes de las uñas sobresalientes, sobre todo en caso de modificaciones patológicas de las uñas, o reducir e igualar de forma selectiva las placas de las uñas deformadas.

Además de la probada forma básica cilíndrica 840T, ahora ofrecemos la posibilidad de un tratamiento más complejo y delicado con la forma cilíndrica de menores dimensiones 841T. Con la nueva forma 828T reducirá usted con la superficie TOP diamantada, con mayor visión, las uñas deformadas o las sobresalientes de manera antinatural, mientras que la segura superficie lateral cóncava y lisa se adaptará al contorno delantero y lateral de la piel. La nueva forma 805T, con superficie lateral recta y lisa, se apoya sobre la zona de piel lateral al reducir las superficies laterales de la uña. Las nuevas formas ofrecen, por principio, más libertad de movimiento al podólogo.





Velocidad de uso recomendada: 5000-10 000 rpm



Recomendamos por principio reducir las velocidades en la técnica en seco, así como en el tratamiento de los pacientes de riesgo.







Canto biselado de seguridad




				
	BUSCH	840T	8840T	grano fino
Ø ISO	050	050		

				
	BUSCH	841T	8841T	grano fino
Ø ISO	032	032		

				
	BUSCH	828T	8828T	grano fino
Ø ISO	065	065		

				
	BUSCH	805T	8805T	grano fino
Ø ISO	065	065		

 = Unidad de embalaje



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Postfach 1152 • 51751 Engelskirchen • Unterkaltenbach 17-27 • 51766 Engelskirchen • GERMANY
Telefon +49 (0) 2263 860 • Telefax +49 (0) 2263 20741 • mail@busch.eu • www.busch.eu